

RCA Symphonix™



USER GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR

GUÍA DEL USUARIO

Getting Started.....	1
Install the Battery.....	1
Twist the Tube and Dome to the Correct Side for Your Ear	2
Put the Earpiece On.....	3
Getting used to wearing the earpiece	3
Adjust the Volume.....	4
Adjusting the volume: an example	4
Low-battery indicator.....	5
Getting used to new sounds.....	5
Cleaning and Care	6
Suggested maintenance.....	6
Installing a New Tube.....	9
To replace the wide tube and dome.....	9
Buying and using a thin tube and dome.....	10
Tour of the RCA Symphonix Earpiece	12
Troubleshooting	13
6-Month Limited Warranty.....	15

Pour des instructions en français, se reporter à la page 16.

Para obtener instrucciones en español, consulte la página 33.

©2012 Audiovox Accessories Corp.

Indianapolis, IN

Trademark(s)® Registered Marque(s) de commerce déposée(s)®

Marca(s)® Registrada(s)

MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE | HECHO EN CHINA

www.RCASymphonix.com

6-month limited warranty. See inside for details.

Garantie limitée de 6 mois. Voir à l'intérieur pour plus de détails.

Garantía limitada de 6 meses. Consulte más detalles en el interior.

RPSA05 NA UG 01

Para Empezar	34
Instale la Batería	34
Gire el tubo y el domo hacia el lado correcto para el oído donde llevará el auricular.....	35
Colóquese el auricular.....	35
Acostumbrándose a utilizar el auricular	36
Ajuste el Volumen	36
Ajuste de volumen: un ejemplo	36
Indicador de batería baja	37
Acostumbrándose a los sonidos nuevos	37
Cuidado y Limpieza	37
Mantenimiento sugerido	38
Instalación de un tubo nuevo	40
Para reemplazar el tubo ancho y el domo	40
Adquisición y utilización de un tubo delgado y un domo.....	41
Recorrido del Auricular Symphonix de RCA	42
Resolución de problemas	43
Garantía Limitada de 6 Meses.....	44

¡Felicidades por su adquisición del Amplificador Personal de Sonido Symphonix de RCA! Este aparato ha sido diseñado para mejorar su audición en ciertas situaciones, como durante reuniones, al ver TV o en fiestas, donde otros sonidos puedan interferir. El Amplificador Personal de Sonido Symphonix de RCA le permite seleccionar el nivel de amplificación y de filtración de ruido.



Para Empezar

El Amplificador Personal de Sonido RPSA05 Symphonix de RCA incluye las siguientes piezas:

- :: Auricular (con el tubo ancho y el domo de tamaño mediano instalados)
- :: 1 batería A312
- :: Estuche de almacenamiento
- :: 1 domo pequeño



Instale la Batería

1. Abra la puerta del compartimiento de la batería ubicada en la parte posterior del auricular.
2. Encuentre la bolsa de la batería dentro del estuche de almacenamiento. Saque la batería de la bolsa.
3. Despegue la lengüeta protectora de la parte posterior de la batería.

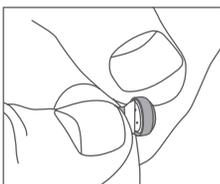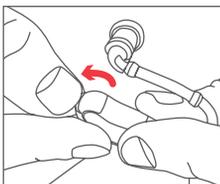

IMPORTANTE: ¡No retire la lengüeta protectora de la batería hasta que no esté listo para utilizarla! La batería ZA312 puede durar años almacenada si no le retira la lengüeta protectora (verifique la fecha de expiración). Cuando se retira la lengüeta, la batería se activa para poder utilizarse, lo que significa que se descargará en cuestión de semanas (probablemente con mayor rapidez), ya sea que se use o no.

4. Coloque la batería en la puerta del compartimiento de la batería según se ilustra aquí.
5. Cierre bien la puerta del compartimiento de la batería.

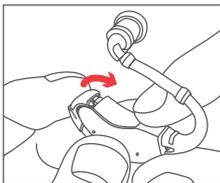
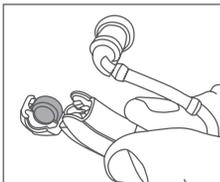


AVISO: La vida útil típica de la batería del auricular RPSA05 es de 7 días de uso. El auricular RPSA05 utiliza baterías A312 estándar para audífonos, disponibles en la mayoría de farmacias. Las baterías de reemplazo están disponibles además a través de RCASymphonix.com o del folleto de Accesorios incluido en este empaque.

IMPORTANTE: Una vez cierre la puerta del compartimiento de la batería, el auricular RPSA05 se encenderá y estará listo para utilizar. El auricular permanecerá encendido hasta que la batería se descargue o hasta que usted abra nuevamente la puerta del compartimiento de la batería. Si no piensa utilizar el auricular por un tiempo, abra la puerta del compartimiento de la batería para conservar la carga de la batería.

Gire el tubo y el domo hacia el lado correcto para el oído donde llevará el auricular

1. Sostenga el auricular con la puerta del compartimiento de la batería apuntada hacia el lado en que desea utilizar el auricular, según se ilustra aquí.
Por ejemplo, si desea utilizar el auricular en el oído izquierdo, sosténgalo con la puerta del compartimiento de la batería en el lado izquierdo.
2. Sostenga el tubo por el extremo con el domo. Gire el extremo del tubo con el domo de manera que quede orientado en dirección contraria a usted.

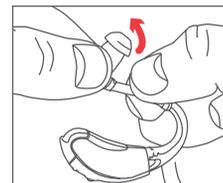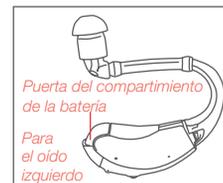

Colóquese el auricular

1. Coloque el cuerpo del auricular detrás del oído.
2. Inserte lentamente el domo en el oído. Acomode el domo cuidadosamente en el conducto auditivo hasta que quede cómodamente ajustado.



Aviso: Asegúrese que el domo esté colocado de manera fija. Si el ajuste es demasiado suelto, podría experimentar retroalimentación.

Acostumbrándose a utilizar el auricular

Al principio, el auricular podría resultarle incómodo. Acostumbrarse a utilizar un objeto extraño en el oído podría tomarle tiempo, pero al pasar los días la incomodidad disminuye. De lo contrario, le aconsejamos probar el domo pequeño incluido en este empaque (consulte las instrucciones en la página siguiente).

Instalación del domo pequeño

El domo que viene previamente instalado en el auricular está diseñado para adaptarse a la mayoría de usuarios. Sin embargo, si luego de utilizar este domo durante algunos días aún siente incomodidad, puede reemplazarlo por el domo pequeño incluido en este empaque.

1. Sujete el auricular con el lado derecho orientado hacia arriba. Sujete el domo entre los dedos pulgar e índice. Fije el extremo del tubo con los dedos pulgar e índice de la otra mano.
2. Vire el domo boca abajo para extraerlo del extremo del tubo.
3. Encuentre en este empaque la bolsa plástica que contiene el domo pequeño. Retire el domo pequeño de la bolsa e insértelo en el extremo del tubo hasta que quede firmemente asentado en su posición.

Ajuste el Volumen

El auricular Symphonix de RCA incluye tres niveles preestablecidos de amplificación de sonido para adaptarse a tres perfiles de usuario o entornos de audición diferentes.

- | | | |
|----------------|----------|--|
| Niveles | 1 | reducción mínima de ruido, amplificación de nivel bajo |
| | 2 | reducción mediana de ruido, ganancia mediana |
| | 3 | reducción máxima de ruido, ganancia máxima |

Cuando enciende el auricular Symphonix, el aparato pasa al ajuste **1** (reducción mínima de ruido, amplificación de nivel bajo).

Para ajustar el volumen: Encuentre el botón de volumen en el cuerpo del auricular. Oprímalo completamente por espacio de 1 segundo. Escuchará 2 pitidos cortos, lo cual significa que el auricular se encuentra en el ajuste **2**.

Para pasar al nivel **3**, oprima nuevamente el botón de volumen por espacio de 1 segundo hasta que escuche 3 pitidos cortos.

Para regresar al nivel **1**, oprima nuevamente el botón de volumen. Deberá escuchar 1 pitido corto. Puede además apagar y luego volver a encender el auricular. El auricular pasará automáticamente al ajuste 1 cuando se vuelva a encender.



Ajuste de volumen: un ejemplo

Imaginemos que alguien se coloca el auricular Symphonix de RCA en el oído y desea ajustar el volumen. He aquí cómo esta persona configurará los ajustes de volumen:

Encenderá al auricular; ajuste de nivel **1**.

Oprimirá una vez el botón de volumen (2 pitidos); ajuste de nivel **2**.

Oprimirá nuevamente el botón de volumen (3 pitidos); ajuste de nivel **3**.

Oprimirá por tercera vez el botón de volumen (1 pitido); ajuste de nivel **1**.

Indicador de batería baja

El auricular Symphonix de RCA incluye un indicador auditivo que le avisa cuando la batería debe reemplazarse: emite un pitido suave constante. De manera que, si escucha un pitido continuo por varios segundos, es hora de reemplazar la batería del auricular Symphonix de RCA. Consulte las instrucciones en la página 34.

Uso del auricular Symphonix de RCA con su teléfono

Usted podrá utilizar el auricular Symphonix de RCA con el teléfono de su hogar o teléfono celular sin experimentar retroalimentación ni incomodidad. Si experimenta algún problema para utilizar el auricular con el teléfono, consulte la sección de resolución de problemas en esta guía.

Acostumbrándose a los sonidos nuevos

El auricular Symphonix de RCA le permite disfrutar de sonidos que quizás no esté acostumbrado a escuchar, sonidos cotidianos como el tic-tac del reloj, el crujir o el roce del papel, el murmullo cercano o una conversación en voz baja, ruidos provenientes del exterior, tales como vida silvestre o tráfico, o pasos cercanos. Podría tomarle tiempo acostumbrarse a todos estos nuevos sonidos; al principio podría resultarle molesto.

Cuidado y Limpieza

Con el cuidado adecuado, el auricular Symphonix de RCA le brindará años de uso ininterrumpido. Es importante tener en mente las siguientes precauciones.

- :: EVITE que caiga agua en o alrededor del auricular.
- :: NO utilice el auricular cuando esté nadando, tomando una ducha, caminando bajo lluvia fuerte o en un ambiente húmedo (por ej., un sauna).
- :: NO utilice líquidos ni solventes en el auricular.
- :: NO utilice solventes en el tubo o el domo.
- :: NO duerma con el auricular colocado en el oído.
- :: NO deje el auricular en o cerca de la luz directa del sol o de fuentes de calor excesivo.
- :: Retírese el auricular Symphonix de RCA cuando se aplique maquillaje, perfume, loción para después de afeitarse, laca para el cabello, o cualquier producto que pudiera caer dentro del auricular.
- :: Retírese el auricular Symphonix de RCA cuando esté practicando actividades extenuantes, tales como ejercicios.
- :: Mantenga el auricular Symphonix de RCA limpio y seco.

Si se encuentra en una situación donde el auricular Symphonix de RCA podría mojarse—por ej., tener que caminar bajo un aguacero sin paraguas—retírese el auricular y guárdelo en el bolsillo o el bolso.

Mantenimiento sugerido

Para obtener el mejor beneficio del auricular Symphonix de RCA, deberá limpiar las piezas de manera rutinaria. Le recomendamos observar el siguiente programa de mantenimiento:

Diario	Limpiar el auricular
Semanalmente	Limpie el tubo y el domo Limpie el micrófono y la entrada de audio
Cada 3 a 4 meses	Reemplazar el tubo y el domo

¡Simplifique su vida! El juego de limpieza de Symphonix de RCA incluye las herramientas exactas que necesita para mantener el auricular, el tubo y el domo limpios y listos para usar, así como planes de servicio para mantener el auricular limpio y en óptimas condiciones de trabajo. Consulte los folletos incluidos en este empaque o visite RCASymphonix.com para obtener información adicional.


Limpieza del auricular

Utilice un paño suave para limpiar el auricular luego de cada uso para remover partículas o humedad. Evite que caiga agua en o alrededor del auricular.

Limpieza del tubo y el domo

IMPORTANTE: Retire la batería antes de limpiar el tubo y el domo.

Abra la puerta del compartimiento de la batería. Luego, retire la batería y colóquela en un lugar seguro – la volverá a instalar cuando termine de limpiar el tubo y el domo. Por último, cierre la puerta del compartimiento de la batería y observe las instrucciones que aparecen a continuación para limpiar el tubo y el domo.

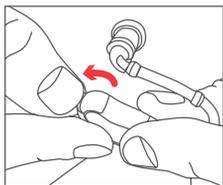

1. Encuentre la parte del tubo usado que se sujeta al auricular. Gire cuidadosamente esta sección del tubo de manera que la entrada de audio quede expuesta (según se ilustra aquí).
2. Tire del tubo directamente del auricular.



IMPORTANTE: NO tire del tubo en un ángulo. De lo contrario podría ocasionar daños al conector del tubo o los componentes del auricular y anular la garantía.

3. Cuando haya retirado el tubo del auricular, utilice un paño suave húmedo o jabón suave y agua para limpiar el tubo y el domo. Puede utilizar el juego de limpieza para accesorios Symphonix de RCA, disponible a través de RCASymphonix.com o del folleto de Accesorios incluido en este empaque.


IMPORTANTE: Asegúrese que todos los componentes estén completamente secos antes de volver a insertarlos en el auricular.

Si hay presencia de cerumen en el tubo: Utilice un pedazo de sedal monofilamento (grosor medio a grueso) para limpiar dentro del tubo. Puede también utilizar una varilla para limpieza de tubos del juego de limpieza de Symphonix de RCA, disponible a través del folleto de Accesorios incluido en este paquete o de RCASymphonix.com.

Limpieza del micrófono y de la entrada de audio

El micrófono y la entrada de audio del auricular se encuentran debajo del conector del tubo. Para limpiar estas piezas, deberá retirar primero el tubo del auricular (consulte la sección Limpieza del tubo y el domo en la página anterior).


Luego de haber retirado el tubo del auricular, utilice un cepillo pequeño para remover cuidadosamente cualquier partícula que se haya alojado en el micrófono o la entrada de audio del auricular (ilustrados aquí). **NO utilice líquidos ni solventes en el auricular.**

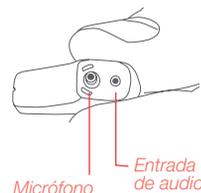


Reinstalación del tubo

Cuando haya terminado de limpiar el tubo y el domo, observe estos pasos para reinstalar el tubo en el auricular.

1. Encuentre la parte del tubo que se sujeta al auricular (ilustrada aquí).

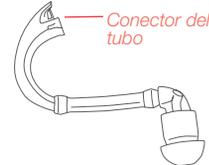

2. Coloque el orificio en la parte inferior del conector del tubo sobre la espiga ubicada en la parte superior del auricular (ilustrada aquí). Coloque el tubo de lado sobre la parte superior del auricular y empujelo completamente hacia abajo para fijarlo al tubo del auricular.

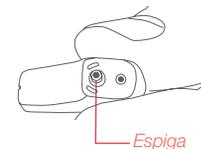

Continúa en la siguiente página...

3. Gire el tubo a la posición correcta para utilizarlo con el auricular.



Reinstalación de la batería

Cuando haya terminado de limpiar el tubo y el domo, observe estos pasos para colocar la batería nuevamente en el auricular.

1. Abra la puerta del compartimiento de la batería ubicada en la parte posterior del auricular.
2. Coloque la batería en la puerta del compartimiento de la batería.
3. Cierre bien la puerta del compartimiento de la batería.

Reemplazo del tubo y del domo: Si necesita reemplazar el tubo y el domo, utilice el folleto de Accesorios incluido en este empaque o visite RCASymphonix.com. Hay diversos tipos de tubos y domos disponibles – el que se incluye con el auricular RPSA05 es el tubo ancho y el domo. Consulte la sección Instalación de un tubo nuevo para obtener información adicional.

Instalación de un tubo nuevo

Le recomendamos reemplazar el tubo y el domo cada 3 a 4 meses para mantener el auricular RPSA05 en óptimas condiciones de trabajo. Puede también reemplazar el tubo ancho y el domo incluido con el auricular RPSA05 con un tubo delgado y un domo de tamaño diferente. Hay disponible una variedad de tubos y domos para el auricular RPSA05 en el folleto de Accesorios o a través de RCASymphonix.com

Para reemplazar el tubo ancho y el domo


1. Encuentre la parte del tubo usado que se sujeta al auricular. Gire cuidadosamente esta sección del tubo de manera que la entrada de audio quede expuesta (según se ilustra aquí).



2. Tire del tubo directamente del auricular.


IMPORTANTE: NO tire del tubo en un ángulo. De lo contrario podría ocasionar daños al conector del tubo o los componentes del auricular y anular la garantía.

3. Encuentre la parte del tubo nuevo (vendido por separado) que se sujeta al auricular (ilustrado aquí).

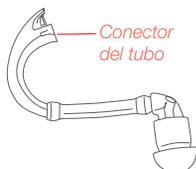

4. Coloque el orificio en la parte inferior del conector del tubo sobre la espiga ubicada en la parte superior del auricular

(ilustrada aquí). Coloque el tubo de lado sobre la parte superior del auricular y empujelo completamente hacia abajo para fijarlo al tubo del auricular.

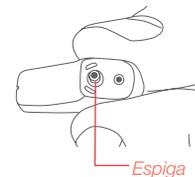

5. Gire el tubo a la posición correcta para utilizarlo con el auricular.

Adquisición y utilización de un tubo delgado y un domo

El auricular RPSA05 incluye un tubo ancho y domo instalados. Otros tamaños de domos y tubos compatibles se venden por separado, y se consiguen a través del folleto de Accesorios o de RCASymphonix.com

IMPORTANTE: El tubo delgado y los domos pequeño/mediano/grande se venden por separado - debe ordenar **AMBOS**, un tubo delgado para el oído en el cual desea llevarlo, **Y** un domo del tamaño adecuado para su oído.

Estas instrucciones no aplican al tubo y al domo incluidos con el auricular RPSA05. Las instrucciones se refieren a los tubos delgados y domos, vendidos por separado.


Para instalar un tubo delgado y un domo:

1. Encuentre la parte del tubo usado que se sujeta al auricular. Gire cuidadosamente esta sección del tubo de manera que la entrada de audio quede expuesta.


2. Tire del tubo directamente del auricular.

IMPORTANTE: NO tire del tubo en un ángulo. De lo contrario podría ocasionar daños al conector del tubo o los componentes del auricular y anular la garantía.

3. Fije un domo nuevo en el extremo de uno de los tubos nuevos empujando cuidadosamente la abertura ubicada en la parte posterior del domo hacia el extremo del tubo. Empuje el domo completamente hacia el extremo del tubo. Asegúrese que el domo quede asentado de manera fija.

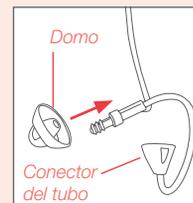

4. Encuentre la parte del tubo que se sujeta al auricular (ilustrado aquí).

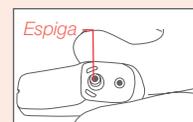


Continúa en la siguiente página...


- Coloque el orificio en la parte inferior del conector del tubo sobre la espiga ubicada en la parte superior del auricular (ilustrada aquí). Coloque el tubo de lado sobre la parte superior del auricular y empújelo completamente hacia abajo para fijarlo al tubo del auricular.

- Gire el tubo a la posición correcta para utilizarlo con el auricular.

Uso del tubo delgado: El tubo delgado incluye una varilla estabilizadora que ayuda a mantener el auricular, el tubo y el domo fijos en el oído. Cuando se coloca el auricular, esta varilla se dobla en la cavidad de la oreja según se ilustra aquí.

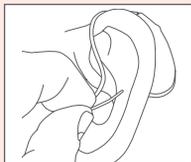

Recorrido del Auricular Symphonix de RCA

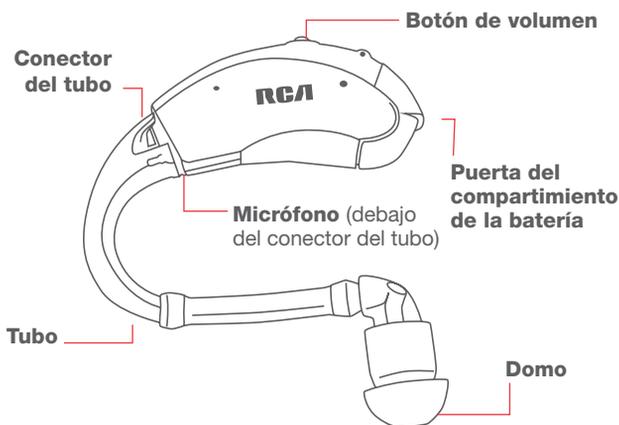

Puerta del compartimiento de la batería aloja la batería reemplazable del auricular RPSA05. Una vez inserte una batería que funcione en esta puerta y la cierre, el auricular RPSA05 se encenderá y estará listo para utilizar.

Botón de volumen alterna entre los tres ajustes de sonido disponibles (consulte la sección Ajuste de volumen)

Conector del tubo se fija al tubo del auricular.

Micrófono recoge los sonidos provenientes del entorno donde se encuentre. Está protegido por el conector del tubo.

Cuerpo del auricular sujeta el sistema electrónico del Amplificador Personal de Sonido Symphonix de RCA. Este sistema electrónico procesa el sonido proveniente del micrófono del auricular.

Tubo transmite el audio del auricular a su oído. El tubo ancho viene fijado al auricular de fábrica. Hay una variedad de tubos

disponibles en el folleto de Accesorios en este empaque o a través de RCASymphonix.com, incluyendo tubos anchos de reemplazo. Consulte la página 40 para obtener información adicional sobre cómo cambiar los tubos.

Domo se ajusta firmemente en el oído, al igual que un audífono.

Resolución de problemas

La mayoría de problemas con el auricular Symphonix de RCA se pueden resolver intentando las siguientes soluciones comunes. Intente cada una de ellas en el orden indicado. Si tiene preguntas adicionales, llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-888-225-2644 o visite RCASymphonix.com.

El auricular no emite sonido.

- La primera vez que encienda el auricular, se experimentará un retraso de 2 a 3 segundos antes de que el circuito esté listo. Esto es normal.
- Asegúrese que la puerta del compartimiento de la batería esté completamente cerrada.
- Asegúrese que la batería del auricular esté funcionando. Posiblemente tendrá que reemplazarla. La vida útil típica de la batería del auricular RPSA05 es de 7 días de uso. El auricular RPSA05 utiliza baterías A312 estándar para audífonos, disponibles en la mayoría de farmacias.
- Asegúrese que el tubo y el domo estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.
- Asegúrese que la entrada de audio y el micrófono estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.

El sonido que emite el auricular no es lo suficientemente alto.

- Intente un ajuste de volumen diferente en el auricular. Oprima por espacio de 1 segundo el botón de volumen del auricular hasta que escuche pitidos. Dos pitidos corresponden al nivel de volumen 2; tres pitidos corresponden al nivel de volumen 3.
- Asegúrese de insertar el domo completamente en el oído. Acómódelo cuidadosamente en el conducto auditivo.
- Asegúrese que el tubo esté bien enganchado en el auricular y que el domo esté completamente asentado en el extremo del tubo.
- Asegúrese que el tubo y el domo estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.
- Asegúrese que la entrada de audio y el micrófono estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.
- Quizá esté produciendo una cantidad excesiva de cerumen. Consulte a un profesional en audición o cuidados de salud.

El auricular emite un chillido o retroalimentación.

- Asegúrese que el tubo esté bien enganchado en el auricular y que el domo esté completamente asentado en el extremo del tubo.
- Asegúrese de insertar el domo completamente en el oído. Acómódelo cuidadosamente en el conducto auditivo.
- Quizá esté produciendo una cantidad excesiva de cerumen. Consulte a un profesional en audición o cuidados de salud.

El auricular continúa emitiendo pitidos.

- Esto significa que el auricular necesita una batería nueva. El auricular RPSA05 utiliza baterías A312 estándar para audífonos, disponibles en la mayoría de farmacias.

El sonido está distorsionado/no es claro.

- Puede ser necesario reemplazar la batería del auricular. La vida útil típica de la batería del auricular RPSA05 es de 7 días de uso. El auricular RPSA05 utiliza baterías A312 estándar para audífonos, disponibles en la mayoría de farmacias.
- Asegúrese que el tubo y el domo estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.
- Asegúrese que la entrada de audio y el micrófono estén limpios. Siga las instrucciones que aparecen en la página 38 para limpiarlos.

:: Su auricular Symphonix de RCA podría estar dañado. Comuníquese con el servicio al cliente por el 1-888-225-2644.

Hay presencia de cerumen en el tubo

:: Utilice un pedazo de sedal monofilamento (grosor medio a grueso) para limpiar dentro del tubo. Puede también utilizar una varilla para limpieza de tubos del juego de limpieza de Symphonix de RCA, disponible a través del folleto de Accesorios incluido en este paquete o de RCASymphonix.com.

Para obtener asistencia adicional con el mantenimiento del auricular, visite RCASymphonix.com

Advertencias Generales

Si padece o piensa que está padeciendo uno de los siguientes síntomas, no utilice este producto hasta consultar a un médico:

- :: Historial de acumulación excesiva de cerumen
- :: Dolor o incomodidad en el oído
- :: Fluido o drenaje del oído en los pasados 90 días
- :: Obstrucción del conducto auditivo, infección prolongada de oído, o sensación de llenura o taponamiento en el oído
- :: Deformidad visible del oído
- :: Pérdida de audición súbita, de progresión rápida o fluctuante en los pasados 90 días
- :: Dificultad auditiva crónica
- :: Zumbido en un solo oído
- :: Pérdida de audición en un solo oído que empeoró en los pasados 90 días
- :: Mareos agudos o crónicos

Mantenga todas las piezas del auricular Symphonix de RCA fuera del alcance de niños menores de 3 años. Estos componentes contienen piezas pequeñas que podrían representar un peligro de asfixia.

Garantía Limitada de 6 Meses

Audiovox Accessories Corporation (the "Company") warrants to the original retail Audiovox Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 6 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados con una unidad nueva, renovada o recertificada (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación.

Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto junto con cualquier accesorio suministrado en el empaque original se entregarán con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente. Esta garantía no aplica a ningún producto o pieza que, sea opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o exposición a líquidos o solventes. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por cerumen o un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad. El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras. No se debe colocar objetos que contengan líquidos, como por ejemplo floreros, sobre el aparato.

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Acate todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
7. No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
9. Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, la caja de contacto y el punto por donde sale del aparato.
10. Desenchufe este aparato en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
11. Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Es necesario darle mantenimiento al aparato si ha sido averiado de alguna forma, por ejemplo, si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se le ha derramado algún líquido encima, si han caído objetos en su interior, si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer.

Información de la FCC

Las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones establecen que los cambios o modificaciones no autorizados a este equipo podrían anular la autoridad del usuario para utilizarlo.

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no debe causar interferencia y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia recibida, incluida aquélla que puede causar un funcionamiento no deseado.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

Este aparato digital de Clase [B] cumple con la Normativa canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Aviso de la FDA sobre Amplificadores Personales de Sonido (PSAP)

Los PSAP han sido diseñados para amplificar el sonido ambiental de usuarios no audiompeidos. No han sido diseñados para compensar un impedimento auditivo. He aquí algunos ejemplos de situaciones en las cuales los PSAP se utilizan rutinariamente: caza (para escuchar la presa), observación de aves, escuchar conferencias donde el orador se encuentra lejos del oyente, y escuchar sonidos suaves que podrían ser difíciles para captar (por ej., conversaciones distantes, espectáculos). Dado que los PSAP no han sido diseñados para diagnosticar, tratar, curar o mitigar enfermedades auditivas, y no altera la estructura o función del cuerpo, no son dispositivos según lo define la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Como tal, no existe una clasificación regulatoria, código de producto o definición para estos productos. Aún más, no existen requisitos para el registro de fabricantes o el listado de estos productos con la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés).

No obstante, los PSAP están sujetos a provisiones aplicables de la Ley de 1968 para el Control de la Radiación por la Salud y la Seguridad, bajo la cual la FDA regula productos electrónicos que emiten vibraciones sónicas, tales como equipo para amplificación de sonido. (Consulte además 21 CFR 1000.15.) Los fabricantes de equipos PSAP deben informar sobre defectos y eventos adversos, y acatar otras medidas descritas en 21 CFR Parte 1003. Los fabricantes de equipos PSAP deben asimismo cumplir con los requisitos para recomprar, reparar o reemplazar productos electrónicos según se estipula bajo 21 CFR Parte 1004.

Deseche las baterías tipo botón con extremo cuidado.

- No permita que los niños jueguen con las baterías tipo botón, y manténgalas fuera del alcance de su niño(a).
- Advértales a los usuarios de audífonos de mantener sus dispositivos y baterías fuera del alcance de los niños.
- Por ninguna razón se meta a la boca baterías tipo botón ya que puede tragárselas accidentalmente.
- Revise los medicamentos antes de ingerirlos. Algunos adultos se han tragado baterías creyendo que eran píldoras o tabletas.
- Mantenga los controles remotos y otros dispositivos electrónicos fuera del alcance de su niño(a) si los compartimentos de las baterías no incluyen tornillos para fijarlos en posición. Utilice cinta adhesiva para ayudar a fijar el compartimiento de la batería.
- Si se ingiere una batería tipo botón, busque atención médica de inmediato. La Línea de Emergencia del National Battery Ingestion Hotline se encuentra disponible a cualquier hora por el (202) 625-3333 (llame con cargo de ser necesario), o llame al centro de control para intoxicaciones por el (800) 222-1222.